

Ecologique et économique, le cure-oreilles APO remplace les cotons-tiges pour prendre soin de vos oreilles et celles de toute la famille.

COMMENT L'UTILISER ?

- 1. Désinfectez la partie cuillère avant et après utilisation.**
- 2. Retirez le cérumen visible à l'entrée de l'oreille (1 à 2 fois par semaine).**
- 3. N'allez pas plus loin, vous risqueriez de vous blesser. Le cérumen protège le tympan, il ne doit pas être retiré totalement.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Le cure-oreilles peut être utilisé sur les enfants mais au calme et impérativement manipulé par un adulte. Ne pas utiliser en cas de lésion dans l'oreille.

COMPOSITON :

**Bâtonnet : bambou
Ficelle : coton
Perle : bois**

Ce petit instrument est originaire du Japon et de Chine, où il est utilisé par la majorité de la population. Celui-ci est taillé et poli en Chine à partir de bambou local. Impression et conditionnement dans le Nord de la France.



PEFC™ 10-31-1328 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Lot :

OH NATURE SAS

**92 Bd du Général de Gaulle
59100 Roubaix, France
www.apofrance.com**

